


BÜHLMANN GanglioCombi® MAG ELISA

Schéma de plaque

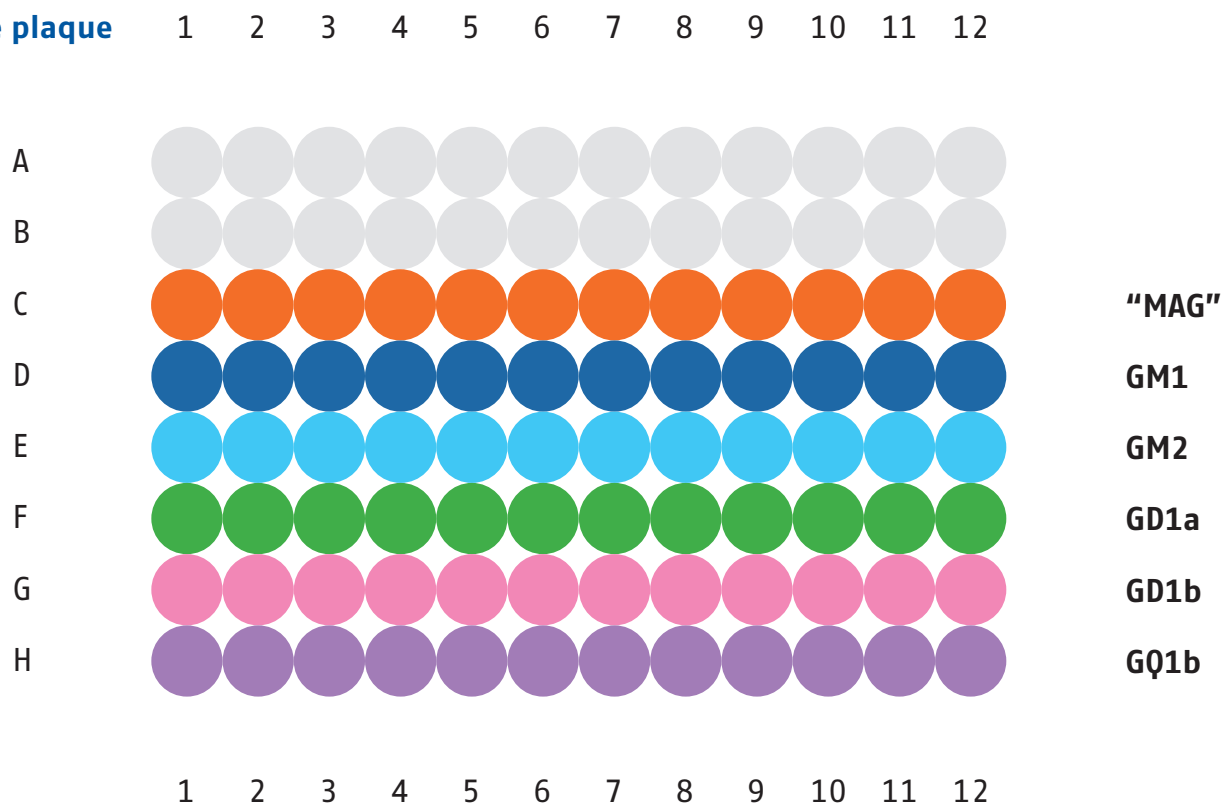


Protocole de pipetage


Plaque de microtitration pré-coatée




100 µL de calibrateur, contrôles
ou échantillons de sérum (1:50)

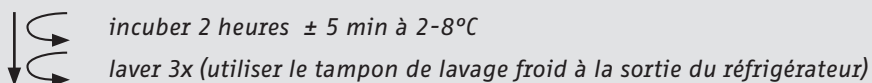

ajouter 100 µL de conjugué(s)

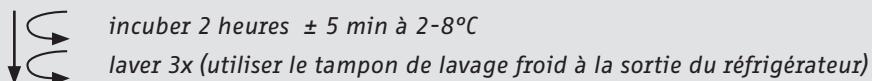


ajouter 100 µL de substrat
(température ambiante)

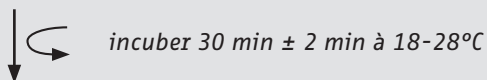

ajouter 100 µL de solution Stop

Lire l'absorbance à 450 nm (sous 30 minutes)

Neuropathie périphérique auto-immune : 4 étapes simples pour compléter le diagnostic dans votre laboratoire

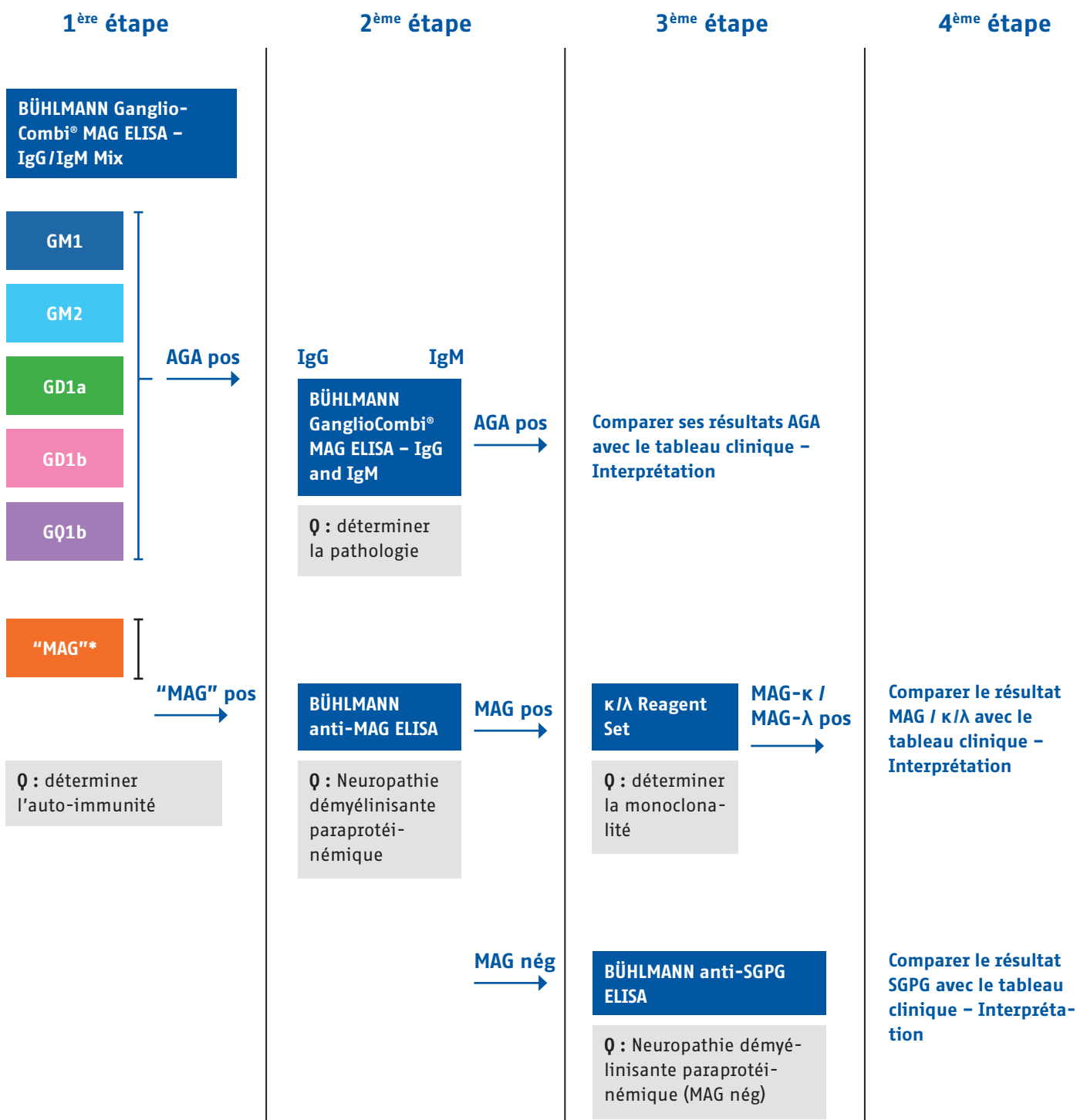

* « MAG » est un composant synthétique, disaccharide sulfate mimant l’activité d’un épitope de la MAG (HNK-1).



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS
France
info@buhlmannlabs.fr
www.buhlmannlabs.fr
Phone +33 3 89 66 91 14

BÜHLMANN GanglioCombi® MAG ELISA
anti-MAG Autoantibodies ELISA
κ/λ Reagent Set
anti-SGPG Autoantibodies ELISA
BÜHLMANN GanglioCombi® Light ELISA
anti-GM1 Autoantibodies ELISA

EK-GCM
EK-MAG
B-KLSET
EK-SGPG
EK-GCL-S
EK-GM1-GM

BÜHLMANN GanglioCombi® est une marque déposée de BÜHLMANN en Suisse.