

Kit d'estrazione

per BÜHLMANN fCAL[®] tests

invalido

B-CAL-EX3
B-CAL-EX12

Data di pubblicazione: 2022-04-26
Versione A2



Produttore

BÜHLMANN Laboratories AG

Baselstrasse 55

4124 Schönenbuch

Svizzera

Telefono: +41 61 487 1212

Ordini via fax: +41 61 487 1234

Info@buhlmannlabs.ch

www.buhlmannlabs.ch

ITALIANO

USO PREVISTO

Il tampone di estrazione (B-CAL-EX) è un reagente progettato per l'estrazione di calprotectina in campioni di feci utilizzando il Smart-Prep di BÜHLMANN o la procedura di estrazione manuale per le analisi di laboratorio con il test BÜHLMANN fCAL®.

REAGENTI FORNITI

Reagenti	Quantità		Codice	Ricostituzione
	B-CAL-EX3	B-CAL-EX12		
Kit d'estrazione tampone per estrazione	3 flaconi x 125 mL	12 flaconi x 125 mL	B-CAL-EX	Pronto all'uso

Tabella 1

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI

- Smart-Prep (Codice : B-CAL-RD, opzionale)
- Anse per inoculazione da 10 µL
- Provette di polipropilene con tappi a vite da 15 mL necessarie per procedura di estrazione standard
- Vortex per provette
- Bilancia di precisione (10-150 mg)
- Microcentrifuga (≥3000 x g)
- Agitatore per piastre

CONSERVAZIONE E STABILITÀ DEI REAGENTI

Reagenti sigillati / non aperti
Conservare a 2-8 °C. Non utilizzare i reagenti oltre la data di scadenza stampata sulle etichette.
Reagente aperto
Conservare fino a 6 mesi a 2-8 °C.

Tabella 2

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il tampone per estrazione. Le prestazioni del tampone per estrazione subiranno un effetto negativo se conservati diversamente da come specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Questo kit contiene componenti classificati conformemente al Regolamento (CE) N. 1272/2008: cloridrato di 2-metil-4-isotiazolin-3-one (conc. ≥0,0015%), pertanto i reagenti possono causare reazioni allergiche cutanee (H317).
- I componenti non devono essere utilizzati dopo la data di scadenza riportata sulle etichette.
- Lasciare che i reagenti raggiungano la temperatura ambiente. Miscelare bene (agitare con il vortex) i reagenti prima dell'uso.

Estrazione

- Per ottenere risultati quantitativi è importante omogeneizzare l'intero campione di feci nel tampone di estrazione.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Si prega di consultare le IFU corrispondenti per i test BÜHLMANN fCAL®.

ESTRAZIONE DI CAMPIONI DI FECI

Con il Smart-Prep di BÜHLMANN

Come utilizzare il Smart-Prep (Codice: B-CAL-RD) vedere l'istruzione corrispondente per l'uso del dispositivo.

Con la procedura di estrazione manuale ¹⁾

1. Etichettare e pesare la provetta di polipropilene vuota, ansa di inoculazione inclusa. Annotare il peso (tara).
2. Con l'ansa di inoculazione, prelevare da 50 a 100 mg di campione fecale e porli nella provetta già pesata, quindi pesarla di nuovo (peso lordo). Durante la raccolta del campione, evitare di prelevare le fibre alimentari presenti nel campione.
3. Calcolare il peso netto del campione (sottraendo la tara dal peso lordo), spezzare l'ansa di inoculazione e lasciare la sua parte inferiore all'interno della provetta.
4. Aggiungere alla provetta il tampone di estrazione secondo la formula
 $x \text{ mg di feci} \times 49 = y \text{ } \mu\text{L di tampone di estrazione}$ (per es. $50 \text{ mg di feci} + 2.450 \text{ } \mu\text{L di tampone}$), quindi chiudere la provetta.
5. Estrarre il campione nel modo seguente:
 - agitare vigorosamente la provetta di estrazione contenente il tampone e il campione fecale su un vortex (per più provette) alla velocità massima per 30 secondi;
 - quindi incubare la provetta di estrazione per 25 +/- 5 minuti su un agitatore per piastre a ca. 400 rpm. La parte dell'ansa di inoculazione rimasta nella provetta facilita l'agitazione del campione;
 - vortexare vigorosamente la provetta di estrazione per altri 30 secondi.
6. Trasferire 1,5 mL dell'omogenato in una provetta Eppendorf da 2 mL e centrifugare in una microcentrifuga per 5 minuti a 3.000 x g.
7. Far decantare il surnatante in una nuova provetta etichettata e proseguire con la procedura del saggio del corrispondente BÜHLMANN fCAL® tests.

Importante: L'estrazione con il tampone di estrazione (B-CAL-EX) è utile solo in combinazione con il test BÜHLMANN fCAL®.

¹⁾ Secondo l'istruzione per l'uso dei test BÜHLMANN fCAL® ELISA e Quantum Blue® fCAL.

REGISTRO DELLE MODIFICHE

Data	Versione	Modifica
2022-04-26	VA2	Aggiornamento del capitolo "Avvertenze e precauzioni" Aggiornamento del capitolo "Conservazione e stabilità dei reagenti" Revisione del capitolo "simboli"

invalid

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI NEGLI STATI MEMBRI UE

Si prega di segnalare immediatamente al produttore e alle autorità competenti del proprio paese eventuali incidenti gravi avvenuti in relazione all'uso di questo dispositivo.

DANNI DA TRASPORTO

Si prega di avvisare il distributore se questo prodotto è stato ricevuto danneggiato.

SIMBOLI

BÜHLMANN utilizza i simboli e i segni elencati e descritti nella norma ISO 15223-1.

invalid

CE