

Quantum Blue® Anti-Adalimumab

Medikamenten-Antikörper Schnelltest

Anti-ADM-Antikörper
Ergebnis innerhalb
von Minuten



- Lateral-Flow Schnelltest zur Bestimmung von Anti-Adalimumab-Antikörpern
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Hohe Korrelation zum Referenz-ELISA
- Ermöglicht vollständiges Monitoring zusammen mit Adalimumab-Medikamenten-spiegel-Schnelltest



Quantum Blue® Anti-Adalimumab Medikamenten-Antikörper Schnelltest

Merkmale:

- Schnellster Assay für qualitative Anti-Adalimumab-Antikörper Messungen im Markt
- Unverzögliche Ergebnisse ermöglichen patientennahen Einsatz
- Kombination aus Medikamentenspiegel und Medikamentenspiegel-Antikörpern ist eine ideale Komplettlösung auf der populären Quantum Blue® Plattform
- Medikamenten-Sensitivität ermöglicht die Bestimmung von freien Antikörpern
- Hohe Übereinstimmung von 91,7 % zum etablierten Referenz-ELISA

		RIDASCREEN Kategorie (≥2.5 ng/mL)		
		Negativ	Positiv	Gesamt
Quantum Blue® Anti-Adalimumab (0.2 µg _{eq} /mL)	Negativ	46	14	60
	Positiv	6	174	180
	Gesamt	52	188	240

Fig.1

Übereinstimmung = 91,7%

Messung von 240 Patientenproben mit dem Quantum Blue® Anti-Adalimumab Schnelltest und einem Referenz-ELISA zeigt eine exzellente **Übereinstimmung von 91,7%** (Fig.1).



BÜHLMANN Laboratories AG
Germany/Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH
Austria
info@buhlmannlabs.at
www.buhlmannlabs.at
Phone +43 662 64 01 05

Quantum Blue® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.

Bestellcodes:
LF-ADAD10 10 Testkassetten
LF-ADAD25 25 Testkassetten

Weitere Quantum Blue® Produkte:
LF-ADIF10 / 25 10 / 25 Testkassetten
LF-TLIF10 / 25 10 / 25 Testkassetten
LF-TLAD10 / 25 10 / 25 Testkassetten
LF-CALE25 25 Testkassetten
LF-CHR25 25 Testkassetten

☑️-markierte Produkte