



# Guía rápida - Quantum Blue® Reader de 3ª generación - Fail Safe Mode

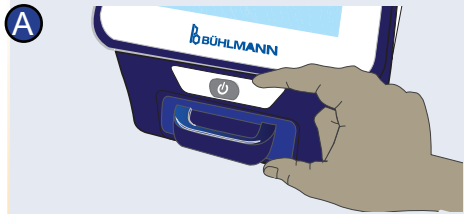


Encienda el Quantum Blue® Reader y siga las instrucciones de la pantalla.


Si se le solicita, introduzca el ID de usuario y la contraseña.

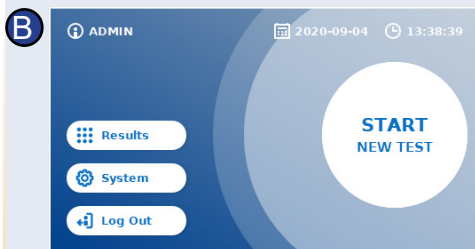


Para iniciar una nueva medición, pulse «INICIO NUEVA PRUEBA (START NEW TEST)».

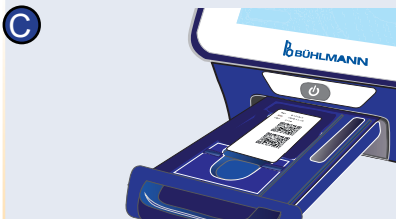


Abra la bandeja y coloque la tarjeta de código de barras en el soporte como se muestra.

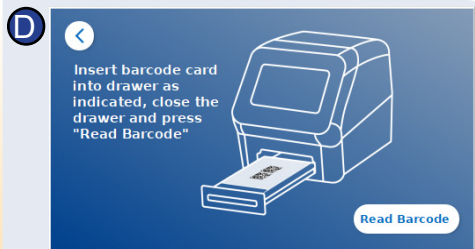

Cierre la bandeja e inicie el proceso de lectura pulsando «Leer (Read Barcode)». Esto carga el método de prueba apropiado en el lector.

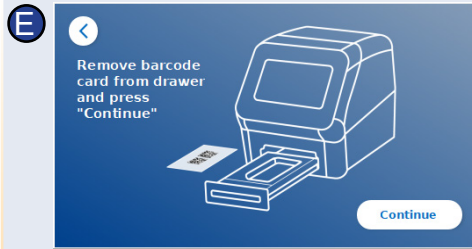

Retire la tarjeta de código de barras y pulse «Continuar (Continue)».

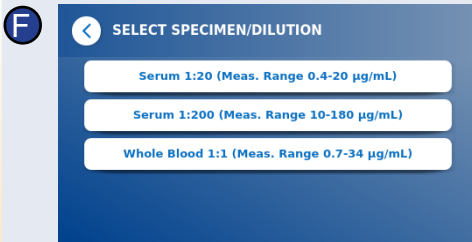

Para algunos métodos de prueba es necesario seleccionar el tipo de muestra y/o su dilución.

Si se le solicita, elija el tipo de muestra y/o la dilución de la muestra en el submenú opcional.




En la pantalla aparece un cuadro resumen de todos los parámetros específicos de la prueba.

Si el resumen y los ajustes específicos de la prueba son correctos, pulse «Continuar (Continue)». En caso contrario, tiene la opción de volver (←) al paso C para cambiar los ajustes de la prueba.



Introduzca el ID del paciente/de la muestra mediante el teclado en pantalla, un teclado externo o un lector de códigos de barras externo\*.

Deben introducirse al menos 3 caracteres. Pulse «Continuar (Continue)» para ir a la pantalla de medición.

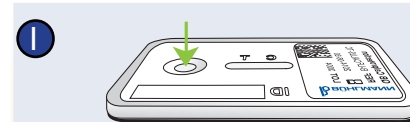

Retire el casete de prueba de su embalaje. Aplique la muestra en el puerto de carga de muestra del casete de prueba.


Nota: Para los volúmenes de aplicación, consulte las instrucciones de uso del ensayo correspondientes.




Abra la bandeja y coloque el casete de prueba en el soporte como se muestra, ...

\*para más detalles, consulte el capítulo «Instalación del equipo/Accesorios» del manual del Quantum Blue® Reader


Cláusula de exención de responsabilidad: Las capturas de pantalla de estas instrucciones de uso son sólo para fines de demostración y pueden variar en función del idioma del lector seleccionado, el método de ensayo utilizado y el número de lote.

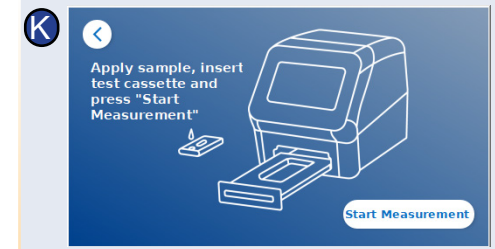

... cierre la bandeja y, a continuación, pulse «Iniciar medición (Start Measurement)».

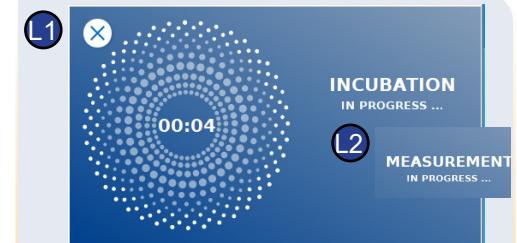

El lector realizará la prueba, empezando por la incubación específica de la prueba (L1), seguida de la medición del casete de prueba (L2).

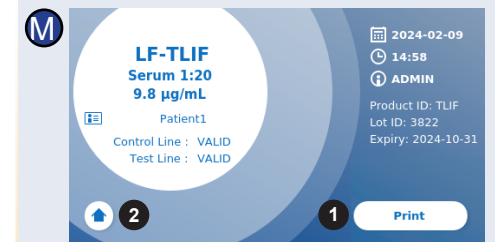

El resultado se muestra en la pantalla de resumen de resultados. Se puede imprimir el resultado (M, 1) o volver a la pantalla de inicio (M, 2) para empezar una nueva medición.

Nota: Los resultados se guardan automáticamente. La impresión requiere la conexión por USB a una impresora dedicada\*.

Pulse el botón ON/OFF durante 2 segundos para apagar el Quantum Blue® Reader.



BÜHLMANN Laboratories AG Teléfono +41 61 487 12 12  
 Baselstrasse 55 Fax +41 61 487 12 99  
 4124 Schönenbuch info@buhlmannlabs.ch  
 Suiza www.buhlmannlabs.ch