

CALEX[®] Cap



Schnelle

Einfache

**Stabile
Stuhl-
extraktion**


- Maximale Workflow Optimierung
- Setzt den Standard für einfache Stuhlextraktion
- Stabil bei Raumtemperatur

Alleinstellungsmerkmale vom CALEX® Cap

Die vorbefüllten Röhrcchen sind fertig für den Gebrauch in drei einfachen Schritten:

- 1** Tauchen Sie die Dosierspitze in die Stuhlprobe und befüllen Sie die Rillen mit dem Probenmaterial.
- 2** Stecken Sie den Dosierstab zurück in das Röhrcchen, verschliessen Sie es fest und extrahieren Sie mit Durchmischen und Vortexen.
- 3** Nur für turbidimetrische Tests: Zentrifugieren Sie das CALEX® Röhrcchen mit dem Extrakt für 10 min.

Der Extrakt mit einer 1:500 Verdünnung ist gebrauchsfertig für die turbidimetrischen Tests (Calprotectin und Pankreas-Elastase).

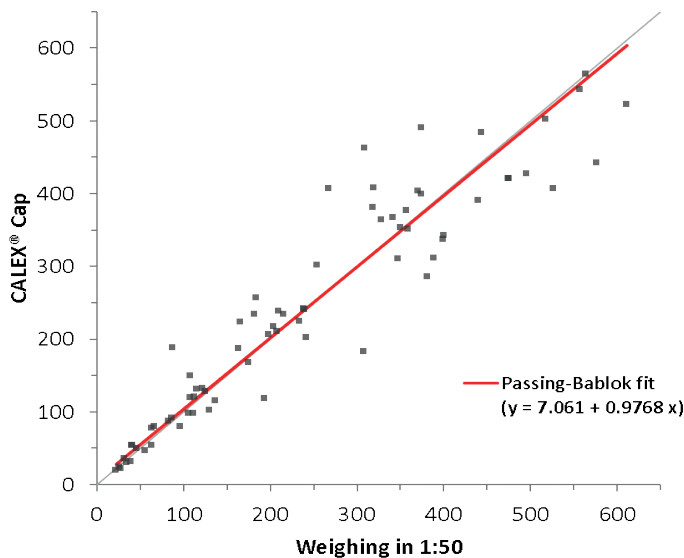

Vergleich von CALEX® Cap und der manuellen Einwaage (Goldstandard). $r^2 = 0.9$

CALEX® – Ein Röhrcchen mit zwei Zugängen



Präanalytischer Zugang

Komplette Laborautomation und problemlose Rackbestückung mit dem neuem Dosierstabkopf

Vollständig quantitative Ergebnisse

Die Cap-Ergonomie erleichtert automatisiertes und manuelles Öffnen
Analytischer Zugang

EINFACH

Die Cap-Ergonomie unterstützt den einfachen und sicheren Umgang mit dem CALEX® Cap und reduziert den Zeitaufwand

AUTOMATISIERBAR

Ausgelegt für den Einsatz in kompletten Laborautomationsystemen (TLA)

STABIL

Die Extrakte sind für 7 Tage stabil bei Raumtemperatur. Das CALEX® Cap entspricht den IATA 650 (UN3373) Transportregeln

EFFIZIENT


Optimierte Verdünnung (1:500) der Stuhlproben ergeben eine maximale Extraktionseffizienz



Vom Patienten zu Hause ...



...in turbo Geschwindigkeit...

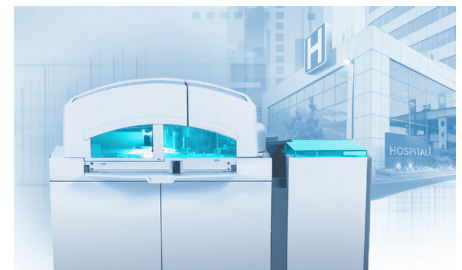

...zum Labor



BÜHLMANN Laboratories AG
Germany/Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 1212

BÜHLMANN in Austria GmbH
Austria
info@buhlmannlabs.at
www.buhlmannlabs.at
Phone +43 662 64 01 05



Bestellcodes:

B-CALEX-C50	50 Stück
B-CALEX-C200	200 Stück
B-CALEX-C500	500 Stück

CE-markierte Produkte

CALEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.
Bestandteile von CALEX® Cap sind patentgeschützt durch:
EP2833795(B1); US9752967(B2); AU2016203121(B2);
CA2997598(C); JP6307132(B2); KR10-1875862(B1).